

Care+

ORAL

FÓRMULA
EXTRA
FUERTE

Crema adhesiva para dentaduras postizas

Sin sabor

¿Qué es?

Las dentaduras postizas tienen como finalidad sustituir las piezas dentales perdidas. La utilización de una crema adhesiva para fijar la dentadura a las encías es la mejor opción de fijación para garantizar la comodidad y la seguridad, y así no tener problemas al comer, hablar o reír.

Care+ Crema adhesiva para dentaduras postizas proporciona una fijación extrafuerte que reduce el movimiento de las dentaduras postizas, mejorando la fuerza para masticar lo que le permite comer alimentos duros y tomar bebidas calientes sin problemas. Su potente efecto adhesivo **permanece todo el día** impidiendo el deslizamiento de la dentadura, lo que evita que la mucosa se irrite por el roce entre la prótesis y la encía.

Care+ Crema adhesiva para dentaduras postizas ayuda a evitar que los restos de comida entren en el espacio entre la encía y la dentadura creando una **barrera protectora y un sellado eficaz**.

El uso diario de Care+ Crema adhesiva para dentaduras postizas le proporcionará una gran comodidad, seguridad y reforzará su confianza al comer, al hablar y al reír.


- ✓ Fijación **EXTRAFUERTE** durante todo el día.
- ✓ **Sin Zinc**, sin parabenos, sin conservantes, sin colorantes y sin aromas.
- ✓ **Sin sabor** para no alterar el sabor de los alimentos.
- ✓ **Sellado eficaz** que previene la entrada de partículas de comida bajo la dentadura, mejorando la higiene.
- ✓ Con **boquilla de fácil aplicación**, que permite una aplicación rápida del producto.

Modo de empleo



Cómo utilizar la crema adhesiva:

1. Limpiar y secar la dentadura.
2. Aplicar pequeñas cantidades de crema con ayuda del aplicador. Aplicar tres tiras delgadas en la dentadura superior (figura A) y dos en la inferior (figura B). No poner cerca de los extremos para evitar que rebese.
3. Colocar la dentadura en la boca (figura C) y sujetar-la firmemente unos segundos manteniendo la boca bien cerrada. Esperar unos minutos antes de comer o beber.
4. Limpiar la boquilla de restos que la podrían obstruir en la siguiente aplicación. Si se obtura el tubo, utilizar una aguja para desobstruirlo. Cerrar bien el tubo.

DENTADURA SUPERIOR

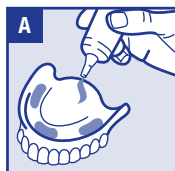

DENTADURA INFERIOR

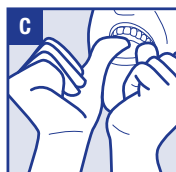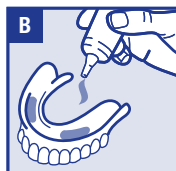

Cómo extraer la dentadura:

1. Enjuagar la boca con agua tibia.
2. Dentadura inferior: colocar el pulgar en el borde de la dentadura en la parte posterior y realizar leves movimientos hacia los lados y hacia arriba para que la dentadura se vaya despegando y sacarla con suavidad.
3. Dentadura superior: colocar el dedo índice o pulgar en el borde de la dentadura en la parte posterior y presionar suavemente hacia arriba y hacia fuera. Luego empujar hacia abajo para sacarla suavemente.
4. Enjuagar la boca con agua tibia y si quedan restos de adhesivo en las encías retirarlos con un cepillo suave y agua tibia.
5. Limpiar la dentadura y eliminar todos los restos de adhesivo con un cepillo.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Visite a su dentista frecuentemente para revisar su salud bucal. No usar este producto si tiene hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. Si aparecen molestias debido al uso del producto, deje de utilizarlo y consulte a su dentista o farmacéutico. No ingerir. Mantenga limpio y seco el aplicador para evitar obturaciones en la salida de la crema adhesiva. Si al final del día, la prótesis está fuertemente sujeta a la boca, **aplique menos adhesivo la siguiente vez**. Conservar en lugar fresco y seco. No utilizar tras la fecha de caducidad. No utilizar **Care+ Crema adhesiva para dentaduras postizas** más de una vez al día.

Ingredientes

Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum.

Care+ Crema adhesiva para dentaduras postizas es un producto fabricado bajo los estándares de calidad de STADA, multinacional farmacéutica alemana especializada en el cuidado de la salud y el bienestar.

Modificación más reciente de estas instrucciones de uso: Mayo 2017



Helago-Pharma GmbH,
An der Schleifmühle 2,
D-50374 Erftstadt. Alemania.



Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.,
Frederic Mompou 5,
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

